



## INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### MASQUE BARRIERE

**DESCRIPTION :** ce masque lavable et réutilisable est un masque barrière, confectionné en complexe technique deux couches, fixation par des brides élastiques.

« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »

Ce masque peut être ajusté sur le nez, la bouche et le menton de la personne qui le porte permettant une étanchéité parfaite sur les côtés. Ce masque est destiné à diminuer le facteur de risque de transmission des agents infectieux.

**Recommandation :** afin de protéger au mieux la santé et sécurité de l'utilisateur nous préconisons de laver ce masque avant la première utilisation. Respecter scrupuleusement les consignes de la présente notice

*Cet article est en stade d'essais par des organismes officiels*

#### UTILISATION :

- L'utilisation de ces masques barrières est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Ils ne sont pas destinés à des patients symptomatiques présentant durs troubles respiratoires.
- Ils sont réservés à des individus dans le cadre de leur activité professionnelle
- Ils ne pourront aucunement remplacer des EPI dont le port est rendu nécessaire au poste de travail
- Ils sont utilisés dans le respect stricte des recommandations en termes des gestes barrières, de distanciation sociale et dans le cadre des mesures de confinement prisent dans le contexte de l'épidémie COVID 19.
- Comme tout masque barrière, la durée du port est limitée à 4 heures.

#### MODE D'EMPLOI

##### Mise en place du masque barrière

1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
2. Repérer le haut du masque et placer le masque barrière sur le visage
3. Tenir le masque, passer les élastiques derrière les oreilles, baisser pour couvrir le menton
5. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
6. Chaque fois que le masque barrière est touché, le porteur doit se laver les mains.



##### Retirer le masque:

1. Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques, sans toucher la partie avant
2. Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu'au prochain lavage
3. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique



ESPUNA – GESTION DE LA QUALITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## MASQUE BARRIERE

**ENTRETIEN** pour le traitement à domicile :

- Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C ;

- Séchage mécanique (inférieur 90 °C) ou séchage conventionnel, suivi dans les 2 cas d'un repassage à la vapeur à une température inférieure à 100 °C

### INSPECTION APRES-LAVAGE:

Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moins d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.

**CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE** : es masques barrières sont emballés de manière à être protégées contre tout dommage mécanique et toute contamination avant l'emploi. Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés.

Lot n° : S19B-2020

**espuna**

ESPUNA INTERNATIONAL SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc

BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 –

[www.espuna.fr](http://www.espuna.fr) Email : [info@espuna.fr](mailto:info@espuna.fr)